

VISCODERM[®]
hydrobooster



EVERYONE IS A MASTERPIECE.



Caring Innovation

VISCODERM® hydrobooster



Der neue Behandlungsansatz für Stirnfalten, Krähenfüße und Barcodes (Oberlippenfältchen). Die HYDROSTRETCH Action ermöglicht nun auch für dynamische Falten natürliche Ergebnisse.

Hydratation und Stretching - der VISCODERM® hydrobooster vereint die biologische Wirkkraft der Hyaluronsäure mit einem Stretching-Effekt der Haut.

Für natürliche Behandlungsergebnisse an besonders dynamischen Arealen wie z.B. perioral, periokular und der Stirn sorgt HYDROSTRETCH Action für die tiefe Hydratisierung und Stimulation von Restrukturierungsvorgängen der Haut. Gleichzeitig können Falten nicht nur angehoben, sondern auch durch Dehnung (Stretching) geglättet werden.

Die hohe Elastizität und Verformbarkeit sowie eine optimale Gewebeintegration erlauben die Anwendung in verschiedenen Ebenen der Dermis. Speziell Falten in oberflächlichen Schichten der Dermis können geglättet werden ohne ungewünschtes Volumen aufzubauen.

Je nach Grad der Hautalterung und Faltengrad werden unterschiedliche Injektionstechniken empfohlen (*siehe nächste Seite*). Das Protokoll sieht 2 Behandlungen im Abstand von 8 Wochen vor. Die Behandlung sollte 2x pro Jahr durchgeführt werden.


ANWENDUNGSAREALE

- Periorale Falten, z.B. Lippenfältchen
- Periokulare Falten, Krähenfüße
- Glabellafalten
- Stirnfalten

KLINISCHER NACHWEIS


HydroACTION	●●●●●
LiftACTION	●●○○○
VERNETZUNGSGRAD	■□□□□
VERFORMBARKEIT	■●■●■□

Studie zum Nachweis der Wirksamkeit bei Reduzierung dynamischer und statischer Falten.

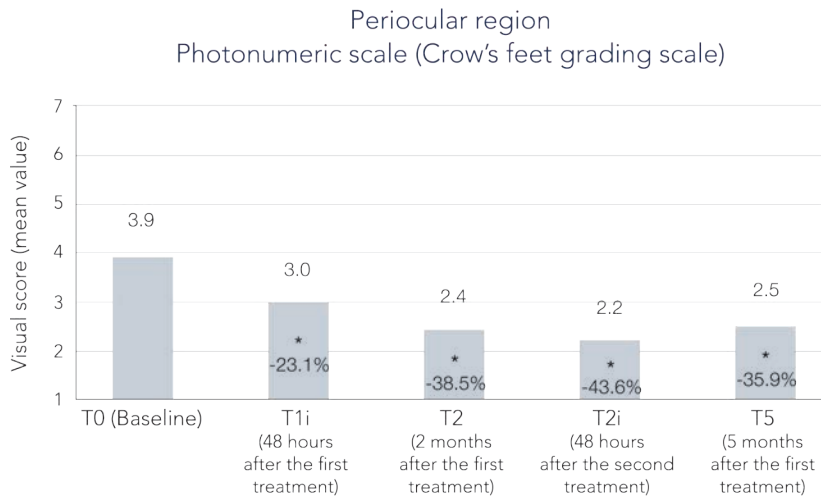

*P<0.05 vs T0

Modified from Sparavigna 2019

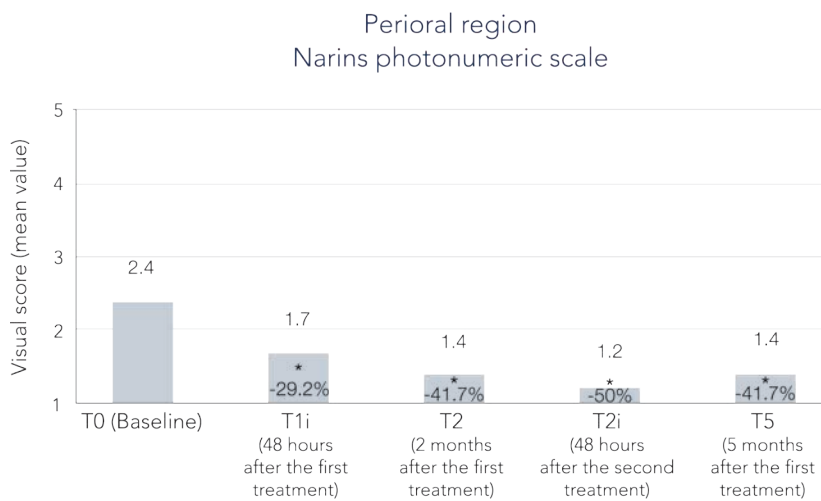

*P<0.05 vs T0

Modified from Sparavigna 2019



- Geltyp Monophasisch
- Molekulargewicht 1.000, 2.000 kDa
Hyaluronsäuren
- Gehalt vernetzte Na-HA 25 mg/ml
- Gehalt an freiem BDDE < 0,1 ppm
- Vernetzungsgrad +
- Nadel 2x 29G x 13 mm
2x 33G x 9 mm (Kit)
- Injektionstiefe indikationsabhängig

VISCODERM® hydrobooster

DIE ANWENDUNGSTECHNIKEN

VISCODERM® hydrobooster ist die einzige injizierbare stabilisierte Hyaluronsäure, die eine Doppelfunktion bietet. Diese wird durch ihre speziellen rheologischen Eigenschaften ermöglicht.

Die geringe Gelsteifigkeit und Viskosität sowie die hohe Verformbarkeit garantieren eine optimale Gewebeintegration und erlauben die Verwendung in verschiedenen Ebenen der Dermis. Die spezielle MicroTröpfchen-Technik erlaubt eine Glättung von Fältchen ohne unerwünschten Volumenaufbau. Aus diesem Grund ist VISCODERM® hydrobooster besonders für Fältchen in den dynamischen Bereichen des Gesichts geeignet.

HYDRATION

und Geweberestrukturierung

+

STRETCH


mechanische Wirkung
bei oberflächlichen Falten

=

HYDROSTRETCH-ACTION

HYDRATION

MICROLINEAR RETROGRADE ODER MICROBOLUS TECHNIK

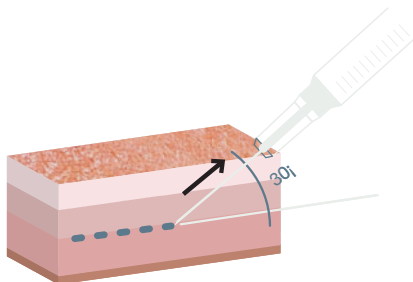

1 MONAT NACH 1. BEHANDLUNG




Courtesy of Dr. P. Piersini

Zur Tiefenhydratation wird VISCODERM® hydrobooster mittels linear-retrograder Technik oder MicroTröpfchen Technik (je Bolus <0,05 ml) subdermal injiziert.


STRETCH

MICROTRÖPFCHEN TECHNIK

Für oberflächliche Falten (Glogau-Skala Typ 2: Falten nur bei Mimik) werden mehrere MicroTröpfchen-Injektionen (jeweils $<0,01$ ml) entlang des Faltenbodens gesetzt. So wird die Falte aufgedehnt (Stretching) und geglättet, ohne Volumen aufzubauen.

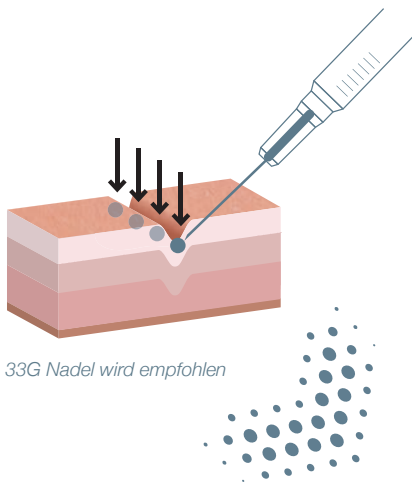

33G Nadel wird empfohlen

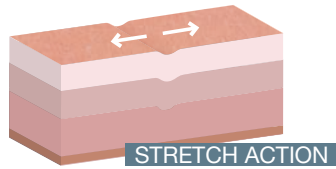


STRETCH ACTION

3 MONATE NACH 2. BEHANDLUNG



Courtesy of Dr. P. Piersini

3 MONATE NACH 2. BEHANDLUNG

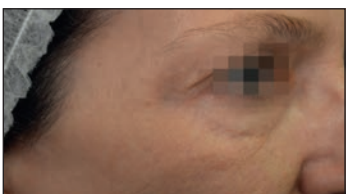


Courtesy of Dr. P. Piersini

DUODYNAMIK TECHNIK

Tiefere Falten (Glogau-Skala Typ 3: Falten auch in entspanntem Zustand) werden zunächst mittels Micro linear-retrograder Technik angehoben und anschließend mit der MicroTröpfchen-Technik (jeweils $<0,01$ ml) aufgedehnt.

Auf Grund des hochelastischen Materials und der daraus möglichen minimalen Produktmenge wird selbst im Bereich der Lachfältchen ein sehr natürliches Ergebnis ohne „Maskeneffekt“ erzielt.

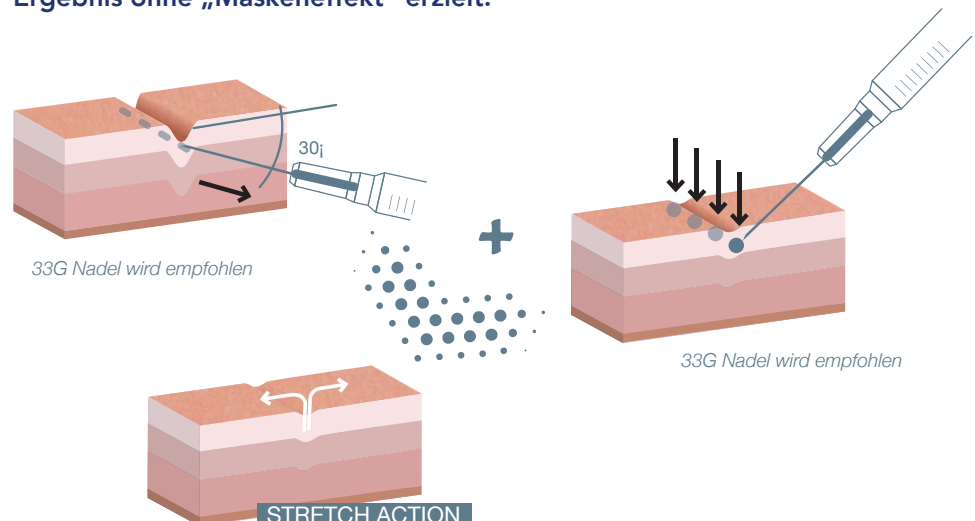

33G Nadel wird empfohlen

33G Nadel wird empfohlen

STRETCH ACTION

EVERYONE IS A MASTERPIECE.



Caring Innovation

my **Beauty**
SHOPPING *caring in balance*

GROSSHANDEL FÜR PRODUKTE
DER ÄSTHETISCHEN MEDIZIN
Exklusiv-Distributor des Herstellers IBSA
für Deutschland und Österreich

Stürzerstraße 12a . D-83043 Bad Aibling

Fon: +49 (0) 80 61.9 38 30 38

Fax: +49 (0) 80 61.9 38 30 31

e-mail: info@prophilo.net

www.prophilo.net & www.mybeautyshopping.net